

Das schadet Ihrem VALPLAST®-Zahnersatz

- harte Zahnbürsten
- Zahnpasta mit Schleif-Partikeln
- Bleich-Mittel
(z.B. Raucher- oder Aufhell-Zahnpasta)
- Prothesen-Reiniger mit Bleichmittel-Zusatz
- Austrocknung
- allzu sorgloser Umgang mit Ihrem
VALPLAST®-Zahnersatz – dieser selbst
ist zwar unzerbrechlich, die Zähne sind
es jedoch nicht



Meine Zahnärztin / Mein Zahnarzt:

Mein Dental-Labor:
Dentalstudio evident
Inhaber: Robert Zalek
Bennoplatz 8
1080 Wien
T + 43/1/408 36 00
F + 43/1/408 36 00-99
office@evident.at
www.evident.at
www.valplast.at



evident®
das Dentalstudio

PFLEGE-PASS

für

VALPLAST® – Flexibler Zahnersatz

Österreichweit



erstmalig erhältlich über



evident®
das Dentalstudio

Liebe Patientin, Lieber Patient,

herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich für **VALPLAST®** entschieden – ein neues, flexibles Zahnersatz-Material mit besonderen Eigenschaften:

- angenehm zu tragen,
- natürlich und
- sehr ästhetisch.

Dritte Zähne, die fast so gut wie die ersten sind.



Ausführliche Infos zu VALPLAST®

finden Sie auf folgenden Websites:

www.evident.at oder www.valplast.at



Spezielle Fragen beantwortet gerne Ihre Zahnärztin oder Ihr Zahnarzt.

Einsetz-Datum Ihres VALPLAST®-Zahnersatzes:

Flexibler Zahnersatz – feste Gewohnheiten bei der Pflege

Wenn Sie die folgenden Pflege-Hinweise beachten, haben Sie lange Freude an Ihrem **VALPLAST®**-Zahnersatz.

VALPLAST®-Pflege-Tipps

- ✓ **Täglich reinigen**
30 – 60 Sekunden unter fließendem warmen Wasser spülen, danach 15 – 30 Minuten in ein Reinigungs-Bad (**VALPLAST®**-Clean oder herkömmlicher Prothesen-Reiniger) legen.
- ✓ **Nach dem Essen spülen**
Kurz unter fließendem Wasser spülen, um Essensreste zu entfernen.
- ✓ **Harte Zahnbürsten meiden**
Sie schonen Ihre **VALPLAST®**-Prothese, wenn Sie bei deren Reinigung auf die Zahnbürste verzichten. Falls Ihnen das schwer fällt, benutzen Sie dafür bitte nur eine besonders weiche Bürste und Wasser.
- ✓ **Im Wasserbad aufbewahren**
Wenn Sie Ihre **VALPLAST®**-Prothese gerade nicht benutzen, legen Sie diese bitte in ein Wasserbad. Dadurch bewahrt das Material seine optimalen Eigenschaften und trocknet nicht aus.
- ✓ **Zahnfleisch-Pflege nicht vergessen**
Regelmäßige Pflege hält Ihre natürlichen Zähne und Ihr Zahnfleisch gesund. Nützliche Tipps bekommen Sie bei ihrer Zahnärztin oder Ihrem Zahnarzt und unter www.evident.at

